



Jedan sustav, tri nijanse:
pojednostavljeno tekuće
rješenje za sve klase kaviteta



Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable Restorative

- ✓ Intuitivan odabir nijansi
- ✓ Za sve klase kaviteta
- ✓ Prirodno prilagodljiva prozirnost
- ✓ Gotovo bez mjehurića pri istiskivanju

Gotovo bez mjehurića i bez nekontroliranog razlijevanja

Kod mnogih tekućih kompozita tijekom istiskivanja mogu se pojaviti mjehurići. Filtek Easy Match Flowable Restorative razvijen je kako bi to spriječio, omogućujući istiskivanje gotovo bez mjehurića i bez „razlijevanja” materijala, za bolju kontrolu pri radu.

Djeluje zahvaljujući unutarnjem dizajnu koji smanjuje turbulenciju i zadržavanje zraka na dva načina:

1. Dizajn šprice

Zahvaljujući posebno dizajniranom kanalu u klipu, zrak može izlaziti iz šprice tijekom procesa punjenja u proizvodnim pogonima tvrtke Solventum. Time se sprječava zadržavanje zraka u šprici, što bi moglo dovesti do pojave mjehurića i nekontroliranog razlijevanja materijala.



2. Dizajn nastavka

Zahvaljujući glatkoj, sužavajućoj unutarnjoj stijenci nastavka, koja odgovara konusnom kutu šprice, materijal može protjecati kroz novi dizajn nastavka bez zadržavanja zraka.

vs.

Uobičajeni nastavci za tekuće kompozite često imaju kutni dizajn koji može zadržavati zrak u materijalu.

Glatki unutarnji dizajn nastavka Solventum šprice pomaže spriječiti zadržavanje zraka.

Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable Restorative

Tokuyama Estelite Universal Flow Super Low	Tokuyama OMNICHROMA FLOW
VOCO GrandioSO Heavy Flow	Ivoclar Tetric EvoFlow®
Dentsply Sirona TPH Spectra® ST Flow	Kerr Herculite™ Ultra Flow

Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable Restorative



Šifra	Opis
Bright	
6325B	(2) šprice, 2 g svaka (1) pakiranje nastavaka / 20 komada
Natural	
6325N	(2) šprice, 2 g svaka (1) pakiranje nastavaka / 20 komada
Warm	
6325W	(2) šprice, 2 g svaka (1) pakiranje nastavaka / 20 komada
Intro kit	
6325K	(3) šprice, 2 g svaka: po jedna nijansa Bright, Natural i Warm (2) pakiranja nastavaka / 20 komada

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative



Šifra	Opis
Bright	
6310B	(20) kapsula, 0,2 g svaka
6320B	(1) šprica, 4 g
Natural	
6310N	(20) kapsula, 0,2 g svaka
6320N	(1) šprica, 4 g
Warm	
6310W	(20) kapsula, 0,2 g svaka
6320W	(1) šprica, 4 g svaka
Intro kit	
6310K	(60) kapsula, 0,2 g svaka: po 20 u nijansama Bright, Natural i Warm
6320K	(3) šprice, 4 g svaka: po jedna u nijansama Bright, Natural i Warm



- ✓ Brzo
- ✓ Jednostavno
- ✓ Prijenosno

New Filtek Easy Match Flowable i Universal restorativni kompoziti sigurni su za zagrijavanje^{1 2} te su kompatibilni s **Solventum™ Filtek™ Composite Warmer**

6510K	Uključuje grijač s bazom za zagrijavanje, držač za kompozit i zaštitnu čahuru, fiksni USB-C kabel, mrežni utikač, adapter za utičnicu te vodič za brzi početak rada
-------	---

1 Kapsule se mogu zagrijavati do 70 °C tijekom najviše 1 sata.

2 Tekuće šprice mogu se zagrijavati do 70 °C tijekom najviše 1 sata, do 25 puta.

© Solventum 2025. Solventum, S logotip i drugi zaštitni znakovi zaštitni su znakovi tvrtke Solventum ili njezinih povezanih društava. 3M, 3M logotip i drugi zaštitni znakovi u vlasništvu i/ili licenci tvrtke 3M zaštitni su znakovi tvrtke 3M Company. Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su svojih odgovarajućih vlasnika. OMG2033955



KCI Medical Limited
Charnwood Campus
10 Bakewell Road
Loughborough
LE11 5RB
01509 611 611

3M Healthcare EMEA Export Limited
2 Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 H0V5
1 800 320 500

Jednostavno i lako

Sa samo tri nijanse – Bright, Natural i Warm – **Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable Restorative** pojednostavljuje odabir nijanse: dovoljno je promatrati i intuitivno odabrati.


Zahvaljujući prirodno prilagodljivoj prozirnosti, omogućuje translucenciju nalik caklini na kosinama i incizalnom rubu te neprozirnost nalik dentinu u ostalim područjima – bez potrebe za opakerom.

- Gotovo bez mjehurića i bez razlijevanja materijala
- Jednostavan i intuitivan odabir nijansi za prednje i stražnje restauracije
- Pojednostavljen asortiman smanjuje otpad kod rijetko korištenih nijansi



Indications for use

Incremental up to 2mm

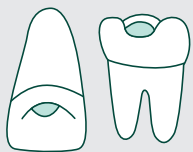

Class I



Class II



Class III



Class IV



Class V



Base



Liner



Repair of indirect
(small defects)



Repair¹



Pit and fissure
sealant

¹ Repair of resin and acrylic temporary materials.

S prirodno prilagodljivim stupnjem prozirnosti

Osigurava translucenciju nalik caklini tamo gdje je potrebna te neprozirnost nalik dentinu u ostalim područjima – bez potrebe za opakerom.

Usporedba tekućih kompozita



Preparacija

Filtek Easy Match Flowable, bez potrebe za opakerom

Tokuyama OMNICHROMA FLOW, bez opakera

Tokuyama OMNICHROMA FLOW, sa opakerom

Usporedba kompozita u pasti



Preparacija

Filtek Easy Match Universal, bez potrebe za opakerom


Tokuyama OMNICHROMA®, bez opakera

Tokuyama OMNICHROMA®, sa opakerom

Izvor za tekuće kompozite: Interni podaci tvrtke Solventum. Tokuyama OMNICHROMA FLOW #121E04, Tokuyama OMNICHROMA® Blocker Flow #142A35, Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable Restorative #10777361.

Izvor kompozite u pasti: Interni podaci tvrtke Solventum. Tokuyama OMNICHROMA® serije #098E53, #002EY8; 3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative serije #9533695, #NE5799

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative i Solventum™ Filtek™ Easy Match Flowable pokazuju isto ponašanje odnosa vrijednosti i debljine sloja, nadmašujući jednobojne sustave, i u tekućoj i u pastoznoj varijanti.

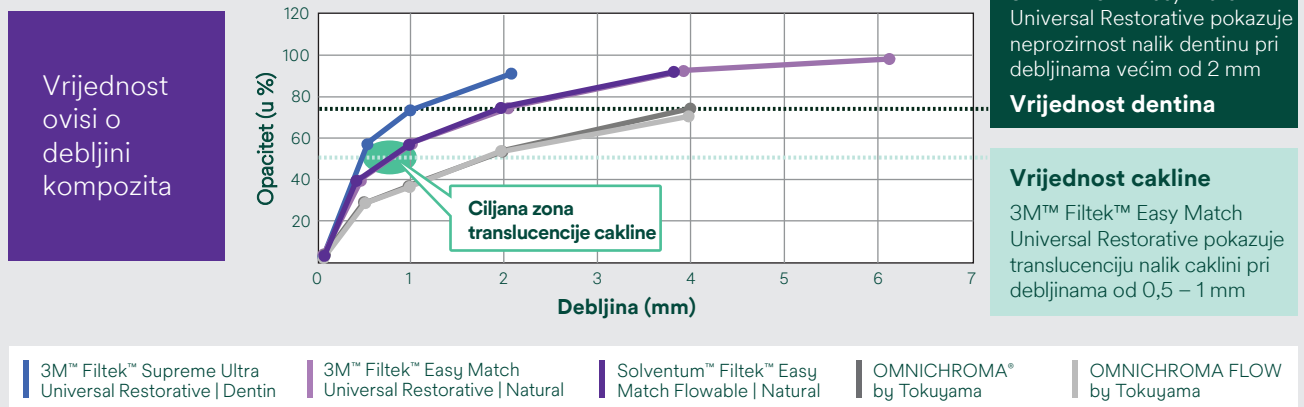

Vrijednost ovisi o debljini kompozita

Ciljana zona translucencije cakline

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative pokazuje neprozirnost nalik dentinu pri debljinama većim od 2 mm
Vrijednost dentina

Vrijednost cakline
3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative pokazuje translucenciju nalik caklini pri debljinama od 0,5 – 1 mm

Izvor: Interni podaci tvrtke Solventum.

Kako funkcionira? Snagom prirodno prilagodljive prozirnosti.

Za razliku od nekih jednobojnih sustava, Filtek Easy Match kompozit – u tekućoj i pastoznoj varijanti – ne zahtijeva opaker za maskiranje tamnine usne šupljine kod frontalnih restauracija. Njegova prirodno prilagodljiva prozirnost osigurava translucenciju nalik caklini pri debljinama od 0,5 do 1 mm, upravo tamo gdje je potrebna – na kosinama i incizalnom rubu. U debljinama ≥ 2 mm, u ostalim područjima, pruža neprozirnost nalik dentinu.

Svi kompoziti postaju prozirniji u tanjim slojevima, no prirodno prilagodljiva prozirnost Filtek Easy Match materijala optimalno je usklađena s dentinom i caklinom, što omogućuje bolje uklapanje u okolnu strukturu zuba i prirodan estetski rezultat.

Intuitivan odabir nijansi

Chroma, odnosno intenzitet boje, samo je jedna od komponenti koja doprinosi dobrom usklađivanju nijanse. Čak i kompozit „odgovarajuće boje” može odudarati od okolne denticije ako njegova vrijednost (relativna svjetlina/tamnina) ili neprozirnost također nisu odgovarajuće usklađene.


Zajedno, tri nijanse Filtek™ Easy Match kompozita pokrivaju VITA classical nijanse bez potrebe za opakerom.

Glavne prednosti oba proizvoda:

- Brz, jednostavan i intuitivan odabir nijansi
- Prirodno prilagodljiva neprozirnost; bez potrebe za opakerom
- Samo tri nijanse osiguravaju izvrsno usklađivanje s osmijehom većine pacijenata
- Pojednostavljen asortiman pomaže smanjiti otpad rijetko korištenih nijansi
- Filtek Easy Match Flowable i Universal Restorative sigurni su za zagrijavanje^{1 2}

1 Kapsule se mogu zagrijavati do 70 °C tijekom najviše 1 sata.

2 Tekuće šprice mogu se zagrijavati do 70 °C tijekom najviše 1 sata, do 25 puta.

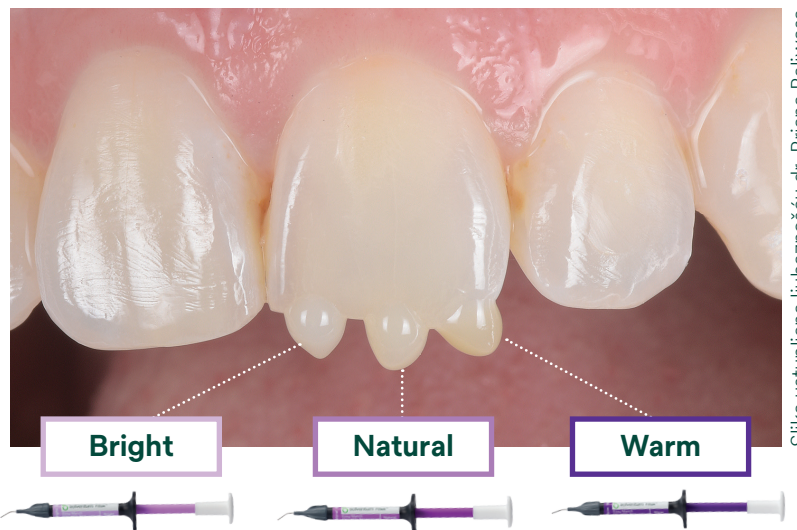

Slika ustupljena ljubaznošću dr. Briana Baliwasa

Bright smile



Reprezentativan primjer nijanse **Bright** zuba



Bright: Niska kroma, visoka vrijednost

Natural smile



Reprezentativan primjer nijanse **Natural** zuba



Natural: Uravnotežena, srednja kroma i vrijednost

Warm smile



Reprezentativan primjer nijanse **Warm** zuba



Warm: Visoka kroma, niska vrijednost